

Hoved- og nakkeimmobiliseringsudstyr

Anbefalet udstyr inkluderer:

- Vandbad eller varmluftsovn
- Hovedstøtte
- CANDOR fikseringsboard



CANDOR EasyFrame Grøn fås i tykkelser på 2,4 og 3,2 mm i tre modeller. Se www.candor-dk.com for yderligere information.

Forberedelse:

1. Forvarm ovnen eller vandbadet til 74°C.
2. Fastgør board til behandlingsbordet, og monter den passende hoved- og nakkestøtte.
3. Placer patienten på bundpladen.
4. Tag masken ud af emballagen.
5. Forbered termoplastmasken.

Opvarmning:

Varmluftsovnsmetode:

- a. Placer masken på ovnristen.
- b. Varm i 3-10 minutter, afhængigt af ovnmodellen. Overskrid ikke 30 minutter.
- c. Masken er klar, når termoplasten er blød og/eller bliver gennemsigtig.
- d. Tag den ud af ovnen.

Vandbadsmetode:

- a. Placer masken i vandbadet oven på vandbadeforingen.
 - b. Varm i 1-2 minutter. Overskrid ikke 5 minutter.
 - c. Masken er klar, når termoplasten blødgør og/eller bliver gennemsigtig.
 - d. Tag den ud af vandbadet, og ryst overskydende vand af.
- Føl på termoplasten for at sikre dig, at den ikke er for varm.

- 2). Tag EasyFrame-masken, mens den stadig er varm og blød, og placer den forsigtigt på patienten, startende ved hagen og halsen, som vist.




- 3). Tryk forsigtigt maskerammen nedad og bagud for at strække termoplastmaterialet over patientens ansigt og hoved.




- 4). Den blå EasyFrame har en tunge på hver side, og disse skal placeres i to huller på Board



- 5). Fortsæt med at trække den blå EasyFrame helt hen mod fikseringsbrættet.

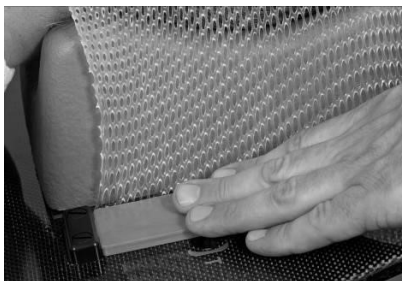

- 6). Tryk nu bagsiden af masken og den blå EasyFrame nedad i låsemekanismen på fikseringsbrættet.

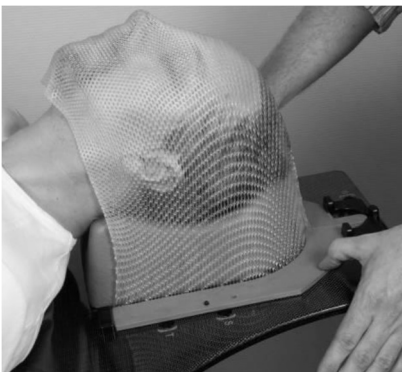

Forsigtig: Brug af dette udstyr kan forårsage mild sensibilisering ved kontakt med huden hos visse følsomme personer.

- 7). Pres og form termoplastmaterialet over patientens ansigt. Form masken omkring patientens hage, næseryggen, øjenhulerne og toppen af hovedet, og vær særlig opmærksom på næseryggen.

Det tager et til to minutter at justere masken omkring patienten. Derfor behøver du ikke at forhaste dig, når du tager en maske på.



- 8). Masken er nu korrekt placeret. Bemærk, at masken ikke er overstrakt, hvilket resulterer i en stabil og sikker maske. Når termoplasten afkøles, bliver den stiv. Fjern ikke masken, før den er helt afkølet, og lad den hvile på patienten i mindst 10 minutter. Termoplast vil krympe en smule under afkølingsprocessen.



Nyttige tips:

En badehætte kan bruges til at dække patientens hår under fremstillingen af masken. I sin blødgjorte tilstand kan termoplasten klæbe til hår, der er blevet sprayet med hårspray. Eventuelle åbne sår eller læsioner bør dækkes med en forbindelse eller plastikfolie, inden masken støbes over dem. Hvis masken ikke passer ordentligt på grund af patientens vægtøgning eller -tab, kan den justeres ved enten punktopvarmning med en varmepistol eller ved at nedsænke dele af masken i varmt vand og støbe dem over patienten igen. Når EasyFrame-masken ikke er i brug, skal den holdes væk fra varme og direkte sollys.



Udvidet gratis IFU findes på www.candor-dk.com/product/nead-easy-frame-mask/

